

Emaka manipulaator

Emaka manipulaator

Toote numbrid

HY500-100	HY500-110	HY500-120
HY500-121	HY500-122	HY500-123
HY500-124	HY500-125	

Ohutus ja vastutus

Enne seadme kasutamist

- kasutusjuhend läbi ja järgige seda.
- Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks hästi nähtavas kohas.

RUDOLF Medical ei vastuta valest kasutamisest, ettevalmistamisest ja hooldamisest tulenevate tagajärgede eest. Sellistel juhtudel kaotab garantii kehtivuse.

Näidustus

Seade on mõeldud kasutamiseks günekoloogias ja viiakse sisse vaginaalselt. Seda kasutatakse emaka paigutamiseks järgneva protseduuriks.

Ainult retsepti alusel

Kasutamiseks ainult kvalifitseeritud spetsialistidel.

Vastunäidustused

Instrument ei ole mõeldud kasutamiseks kesknärvisüsteemis ega vereringesüsteemis.

Infektsioonioht

- Valmistage ette enne kasutamist.
- Valmistage instrument ette enne tootjale tagastamist.


Vigastuste oht

- Kasutage ainult originaalvarustust või teiste tootjate ühilduvaid tarvikuid.
- Ärge kasutage ega parandage kahjustatud instrumente.

Komplekt

- Kontrollige pärast lahtipakkimist kõiki osi, et veenduda, et neil ei ole transpordikahjustusi.
- Kui on tekkinud kahjustusi, võtke ühendust tootjaga.
- Komplektis on kuus adapterit, millest igaühel on erinev läbimõõt, pikkus või disain.

- 1 4-ruudukujuline varras
- 2 Adapter
- 3 Adapteri lukk
- 4 Koonus
- 5 Lopustusoru
- 6 Käepide
- 7 Käepideme osa
- 8 LL-ühendus
- 9 Lauapidike
- 10 Kinnituskrugi
- 11 Liugur

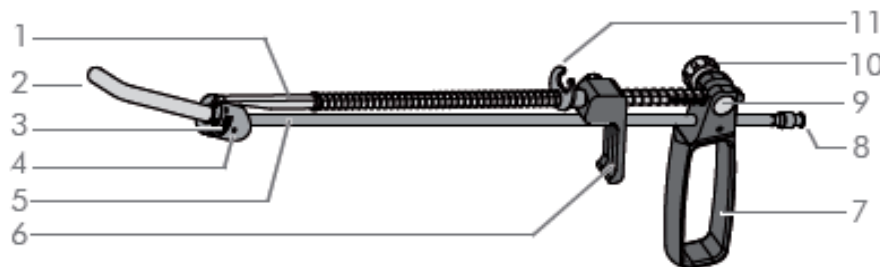

Toote kirjeldus

Pöörleva koonusega adapter võimaldab emaka protseduuri jaoks õigesse asendisse paigutada. Seda koonust saab adapteri abil üles-alla liigutada.

Perforeeritud adapterid võimaldavad protseduuri ajal ka imemist ja loputamist.

Tehnilised andmed

Säilitamis- ja transporditingimused

Kirjeldus	Väärtus
Temperatuur	-30 °C – +40 °C
Suhteline õhuniiskus	≤90 %
Õhurõhk	700–1200 hPa


Toote eluiga

≤1000 tsükli ja ≤2 aastat


Seadme kokkupanek ja lahtivõtmine

5.1 Seadme kokkupanek

- Adapteri suurus määratakse kindlaks vahetult enne operatsiooni.
- Paigaldage O-rõngas loputusvooliku otsa.
- Sisestage loputusvoolik koonusesse ja klappige kokku.

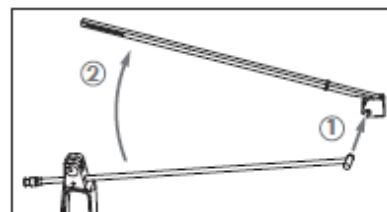


- Paigaldage pikk vedru, seejärel liugur ja seejärel käepide nelinurksele varrele.
- Joondage ruudukujulise varre ja käepideme augud.
- Sisestage kruvi käepidemest ja pingutage.
- Paigaldage lühike vedru nelikantvarraste peale ja suruge käepideme vastu, kuni nelikantvarras sobib käepideme osa juhikusse.

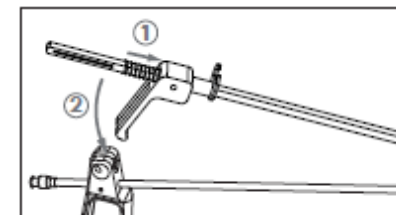


- Asetage kinnituskrugi käepideme osasse ja keerake see vastupideme külge.

5.2 Seadme lahtivõtmine


- Avage adapteri lukk ja eemaldage adapter.

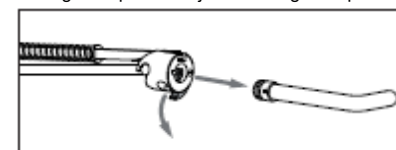


- Vabastage kinnituskrugi ja suruge vastupidur välja.

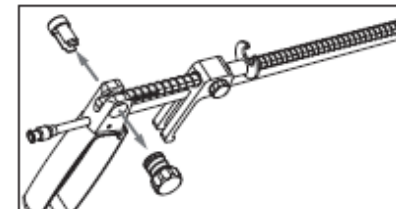


- Lõdvendage käepideme kruvid.

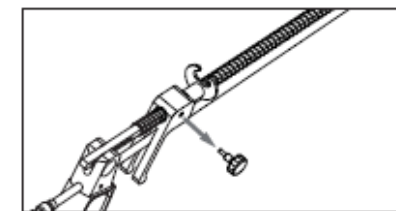

- Suruge vedru käepideme vastu ja klappige nelinurkne varras üles.

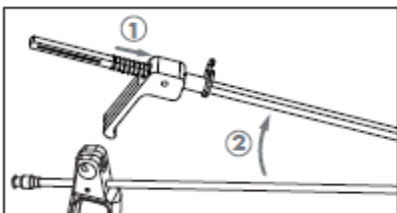

- Eemaldage vedrud, käepide ja liugur.

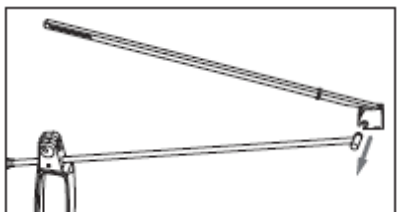

- Eemaldage loputusvooliku otsas olev O-rõngas.

Kohaldage

HOIATUS

Steriliseerimata instrumentidest tulenev nakkusohu.

- Valmistage ette enne kasutamist.
- Paigaldage koonusesse sobiva pikkusega adapter.
- Vajaduse korral ühendage LL-liides loputus-/imiseadmega.

HOIATUS

Vigastuste oht nurga all asuva keermestatud otsiku tõttu.

- Ärge hoidke keermestatud otsikut nurga all, kui viite selle emakakaelasse.
- Sisestage instrument emakakaelasse.
- Lõdvendage klamberkrui veidi.
- Adapterit saab liigutada küljelt küljele.
- Asetage adapter käepideme abil soovitud asendisse.
- Paigutage emakas.
- Viige sisse konksuga tangid.
- Liigutage liugurit konksuga tangide pöidlatugede juurde ja haakige pöidlatugi kinni.
- Viige protseduur läbi.

Ettevalmistus

- Enne ettevalmistamist tuleb instrument lahti monteerida.

Vaadake jaotist „5.2 Instrumenti lahtivõtmine”.
Järgige ka meie üldist teavet
hoolduse, hoolduse ja puhastamise kohta DOK#0301!

Hooldus

Laohoidmise ja hoolduse kohta leiate üksikasjalikku teavet eraldi ettevalmistusjuhendist DOK#0301.

Kõrvaldamine

Kallid toorained on taaskasutatavad, kui neid kõrvaldatakse keskkonnasõbralikul viisil.



Kõrvaldage toode keskkonnasõbralikul viisil vastavalt haigla juhistele.

Sümbolid ja selgitused

	Ettevaatust! Hoiatuste ja ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.
	Järgige kasutusjuhendit!
REF	Tellimisnumber
	Partii number
	Tootja:
	CE-märgis



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Saksamaa
Tel. +49 7463 9956-0
Faks +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com