

Méhmanipulátor

Méhmanipulátor

Cikkszámok

HY500-100	HY500-110	HY500-120
HY500-121	HY500-122	HY500-123
HY500-124	HY500-125	

Biztonság és felelősség

- A készülék használata előtt kérjük,
- olvassa el és kövesse a használati utasítást.
- Tartsa jól látható helyen későbbi használatra.

A RUDOLF Medical nem vállal felelősséget a helytelen használat, előkészítés és ápolás következményeiért. Ilyen esetekben a garancia érvényét veszti.

Javallat

A műszer nőgyógyászati célra szolgál, és hüvelyen keresztül kerül bevezetésre. A méh pozicionálására szolgál a következő beavatkozáshoz.

Csak receptre

Kizárólag képzett szakemberek használhatják.

Ellenjavallat

A műszer nem alkalmas a központi idegrendszer vagy a keringési rendszer kezelésére.

Fertőzésveszély

- Használat előtt készítse elő.
- A gyártónak történő visszaküldés előtt készítse elő a műszert.


Sérülésveszély

- Kizárólag eredeti tartozékokat vagy más gyártók kompatibilis tartozék
- Ne használjon és ne javítson meg sérült műszereket.

A szállítmány tartalma

- A kicsomagolás után ellenőrizze az összes alkatrészt, hogy nincs-e szállítási sérülés.
- Sérülés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
- A készletben hat adapter található, mindegyik különböző átmérőjű, hosszúságú vagy kialakítású.

- 1 4-négyzetes rúd
- 2 Adapter
- 3 Adapterzár
- 4 Kúp
- 5 Öblítőcső
- 6 Fogantyú
- 7 Fogantyú
- 8 LL csatlakozás
- 9 Pulttartó
- 10 Rögzítőcsavar
- 11 Csúszka

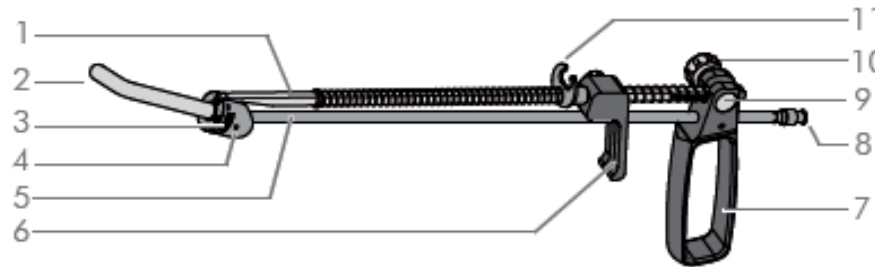

Termékleírás

A forgatható kúpos adapter lehetővé teszi a méh elhelyezését a beavatkozáshoz. Ez a kúpos rész az adapter segítségével felfelé és lefelé mozgatható.

A perforált adapterek lehetővé teszik a szívás és az öblítés elvégzését is a beavatkozás során.

Műszaki adatok

Tárolási és szállítási feltételek


Leírás	Érték
Hőmérséklet	-30 °C – +40 °C
Relatív páratartalom	≤90 %
Légnyomás	700–1200 hPa

Termék élettartama
≤1000 ciklus és ≤2 év


A műszer összeszerelése és szétszerelése

5.1 A műszer összeszerelése

- Az adapter méretét közvetlenül a beavatkozás előtt kell meghatározni.
- Helyezze fel az O-gyűrűt az öblítőcső végére.
- Helyezze be az öblítőcsövet a kúpos részbe, és hajtsa fel.

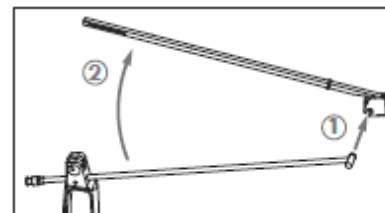


- Helyezze fel a hosszú rugót, majd a csúszkát és a fogantyút a négyzetes rúdra.
- Igazítsa össze a négyzetes rúd és a fogantyú furatait.
- Helyezze be a csavart a fogantyúból, és húzza meg.
- Helyezze a rövid rugót a négyzetes rúdra, és nyomja a fogantyú felé, amíg a négyzetes rúd be nem illeszkedik a fogantyú vezetőjébe.

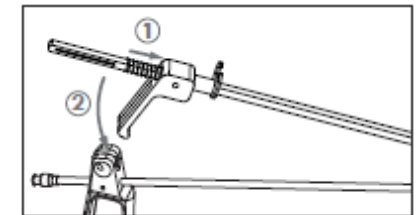


- Helyezze be a rögzítőcsavart a fogantyúba, és csavarozza rá az ellenállás tartójára.

5.2 A műszer szétszerelése


- Nyissa ki az adapter reteszelését, és vegye le az adaptert.

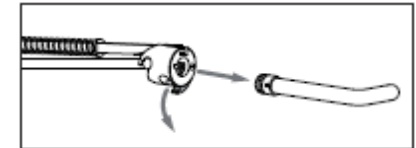


- Engedje ki a rögzítőcsavart, és nyomja ki a számláló tartóját.

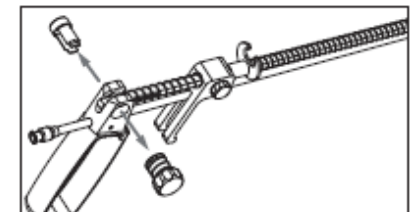


- Lazítsa meg a fogantyún lévő csavarokat.

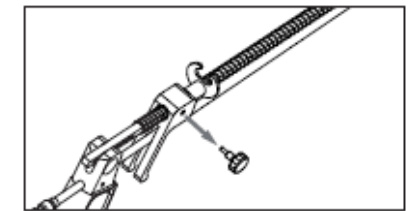

- Nyomja a rugót a fogantyú felé, és hajtsa fel a négyzetes rudat.

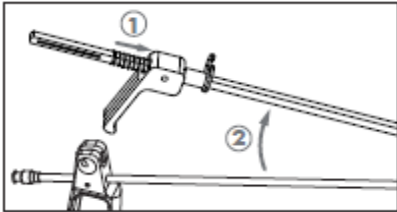

- Vegye le a rugókat, a fogantyút és a csúszkát.

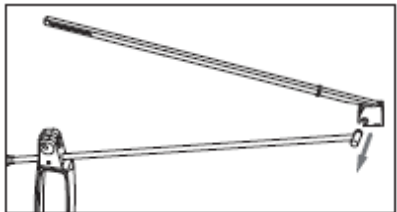

- Vegye le az O-gyűrűt az öblítőcső végéről.

Alkalmazás

FIGYELMEZTETÉS

A nem steril eszközök fertőzésveszélyt jelentenek.

- Használat előtt készítse elő.
- Helyezzen be egy megfelelő hosszúságú adaptert a kúpos részbe.
- Szükség esetén csatlakoztassa az LL csatlakozót egy öblítő/elszívó egységhez.

FIGYELMEZTETÉS

A hajlított menetes végcső okozta sérülésveszély.

- A menetes végződést ne tartsa szögben, amikor azt a méhnyakba vezeti.
- Helyezze be a műszert a méhnyakba.
- Engedje meg kissé a rögzítőcsavart.
- Az adapter oldalra-oldalra mozgatható.
- A fogantyú segítségével állítsa be az adaptert a kívánt helyzetbe.
- Helyezze el a méht.
- Vezesse be a kampós fogót.
- Mozgassa a csúszkát a kampós fogó hüvelykujj-támaszára, és akassza be a hüvelykujj-támaszt.
- Végezze el a beavatkozást.

Előkészítés

- Az eszközt az előkészítés előtt szét kell szerelni.

Lásd az „5.2 A műszer szétszerelése” című részt.

Kérjük, vegye figyelembe a ápolásról, karbantartásról és tisztításról szóló általános információinkat is!

Tárolás

A tárolással és ápolással kapcsolatos részletes információkat a különálló előkészítési utasításban (DOK#0301) találja.

Hulladékkezelés

Az értékes nyersanyagok újrahasznosíthatók, ha környezetbarát módon kerülnek ártalmatlanításra.



A terméket a kórház irányelveinek megfelelően, környezetbarát módon ártalmatlanítsa.

Szimbólumok és magyarázatok

	Figyelem! A figyelmeztetések és óvintézkedések be nem tartása halált vagy súlyos sérüléseket okozhat.
	Kövesse a használati utasítást!
REF	Rendelési szám
	Tételszám
	Gyártó:
	CE jelölés



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Németország
Tel. +49 7463 9956-0
Fax +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com