


D0436 / Rev.D / DCR01770

Cohenin kohdun manipulaattori

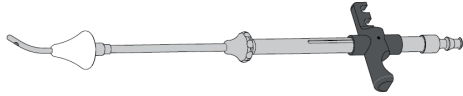

Tuotenumerot

HY500-000		
HY500-010	HY500-020	HY500-030

Turvallisuus ja vastuu

Ennen laitteen käyttöä

- ▶ Lue ja noudata käyttöohjeita.
- ▶ Säilytä nämä ohjeet paikassa, josta ne ovat helposti nähtävissä myöhempää käyttöä varten.

RUDOLF Medical ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat väärästä käytöstä tai virheellisestä valmistelusta ja hoidosta.

Tällaisissa tapauksissa takuu raukeaa.

Käyttöaihe

Tämä instrumentti on tarkoitettu gynekologisiin sovelluksiin ja se asetetaan emättimeen. Sitä käytetään varjoaineen antamiseen ja kohdun asemoimiseen seuraavaa toimenpidettä varten.

Vasta-aiheet

Tätä instrumenttia ei ole tarkoitettu käytettäväksi keskushermostoon tai verenkiertoelimistöön.

Infektioriski

- ▶ Valmistele ennen käyttöä.
- ▶ Valmistele instrumentti ennen sen palauttamista valmistajalle.

Loukkaantumiseriski

- ▶ Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita
- ▶ Älä käytä vaurioituneita instrumentteja äläkä yritä korjata niitä


Toimitus sisältää

- ▶ Tarkista pakkauksen avaamisen jälkeen, ettei osissa ole kuljetusvaurioita.
 - ▶ Jos sinulla on valituksia, ota yhteyttä valmistajaan.
- ↗ Valmistajan osoite löytyy viimeiseltä sivulta.

i Jos tilataan sarja, mukana toimitetaan kaksi sovittinta. Sovittimet ovat kahta eri kokoa.

Tuotekuvaus

Kohdun asento voidaan säätää toimenpiteen valmistelua varten sovittimen avulla. Lisäksi sovittimen kartioputken rei'itys helpottaa varjoaineen tiputtamista diagnostisia tarkoituksia varten. Kartio sulkee kohdunkaulan.

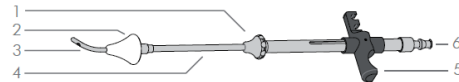

- 1 Karhennettu mutteri
- 2 Sovitin
- 3 Rei'itetty sovitinputki
- 4 Sisävaippa
- 5 Kahva
- 6 LL-liitäntä

Tekniset tiedot

Säilytys- ja kuljetusolosuhteet

- ▶ Kuljeta ja säilytä instrumenttia vain asianmukaisesti suojattuna

Tuotteen käyttöikä


≤1000 sykliä ja ≤2 vuotta

Laitteen kokoaminen ja purkaminen


Laitteen kokoaminen

i Sovittimen koko valitaan välittömästi ennen leikkausta kohdunkaulan koon mukaan.

- ▶ Asenna jousi sisävaippaan.

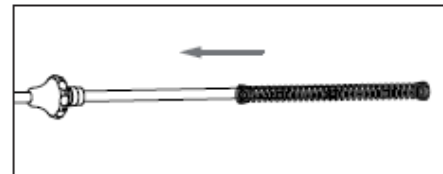


- ▶ Asenna ulkokuori ja ruuvaa se karhennettuun mutteriin.

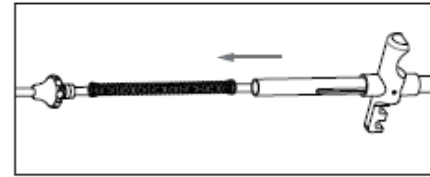


Instrumentin purkaminen

- ▶ Käännä sovittinta hieman ja irrota se.

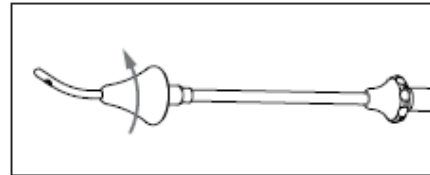

- ▶ Kierrä karhennettua mutteria auki ja ota ulompi varsi jousineen pois.

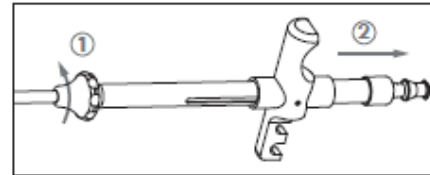


Käyttö

VAROITUS


Infektioriski ei-steriileistä instrumenteista.

- ▶ Valmistele instrumentti ennen käyttöä
- ▶ Valitse adapteri kohdunkaulan koon mukaan.
- ▶ Asenna sovitin ja kiristä se.

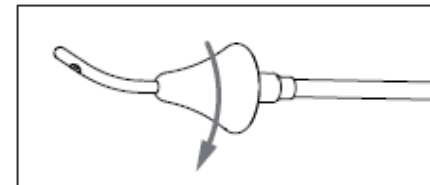


- ▶ Kierrä karhennettua mutteria hieman auki ja käännä sisävaippa oikeaan asentoon niin, että se on linjassa sovittimen kärjen kanssa.

Cohenin kohdun manipulaattori

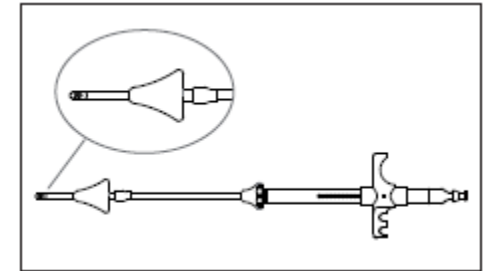

- ▶ Liitä kontrastiainetta sisältävä ruisku LL-liitäntään.
- ▶ Työnnä instrumentti kohdunkaulan aukkaan.
- ▶ Aseta sovitin tarvittavaan asentoon ja kohdista kohtu
- ▶ Aseta tenakulum paikalleen ja tartu kohtuun varovasti.

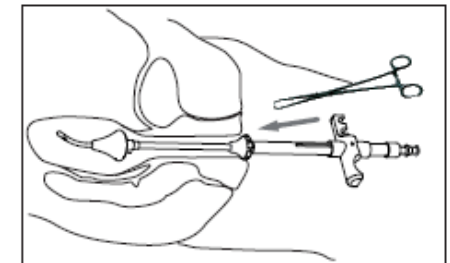

- ▶ Aseta tenakulumien sormiaukko liukukappaleeseen.
- ↳ Laite on kiinnitetty tukevasti paikalleen.
- ▶ Annostele varjoainetta ruiskulla.
- ▶ Valmistele instrumentti.

Valmistelu

i

Laite on purettava ennen valmistelua.

↗ Katso kohta „Laitteen purkaminen“.

↗ Yksityiskohtaiset tiedot valmistelusta ja hoidosta löytyvät erillisestä hoito-, huolto- ja puhdistusohjeesta DOK#301

Säilytys

↗ Yksityiskohtaiset tiedot säilytyksestä ja hoidosta löytyvät erillisestä hoito-, huolto- ja puhdistusohjeesta DOK#301

Hävittäminen

Ympäristöystävällinen hävittäminen mahdollistaa arvokkaiden raaka-aineiden kierrätyksen.



Hävitä laite ympäristöystävällisesti voimassa olevien sairaalan ohjeiden mukaisesti.

Turvallisuustiedot ja symbolien selitykset

	Noudata käyttöohjeita
REF	Tilausnumero
	Ei-steriili
	Valmistaja
	CE-merkintä

