

Pensă de fixare cu clemă, 10 mm



Numere de articol

LP371-001	LP371-002	LP371-003
LP371-004	LP371-005	LP371-010
LP371-020	LP371-030	LP371-040
LP371-050	LP371-100	LP371-101
RU 0365-00/08	RU 0365-00/10	RU 0365-00/12
RU 0365-00/19	RU 0365-00/20	RU 0365-00/21
RU 0365-00/22	RU 0365-00/23	RU 0365-00/24
RU 0365-00/25	RU 0365-00/26	RU 0365-00/27
RU 0365-00/41	RU 0365-00/42	RU 0365-00/43
RU 0365-00/44	RU 0365-00/45	RU 0365-00/46
RU 0365-00/47	RU 0365-00/80	RU 0365-00/81

Utilizare prevăzută

- Utilizatorul decide dacă acest produs medical este adecvat sau nu. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru consecințele utilizării și pregătirii incorecte.

Test de funcționare

- După livrare și înainte de fiecare utilizare, instrumentele noi trebuie supuse unei examinări vizuale amănunțite și trebuie testate din punct de vedere funcțional. Dacă instrumentele prezintă defecte externe (zgârieturi, rupturi, fisuri, creștături, izolație deteriorată, părți îndoite sau rigiditate) sau dacă nu funcționează conform descrierii, vă rugăm să ne informați imediat pe noi, în calitate de producător, sau pe partenerii noștri de vânzări.

Avertismente și precauții

- Nu utilizați instrumente deteriorate.
- Vă rugăm să citiți aceste informații cu atenție și în întregime. Utilizarea necorespunzătoare și îngrijirea greșită, precum și manipularea necorespunzătoare pot cauza degradarea prematură a instrumentelor chirurgicale. Persoanele care utilizează acest instrument trebuie să aibă cunoștințe privind utilizarea

și manipularea instrumentelor chirurgicale, a accesoriilor și a dispozitivelor asociate.

Prima utilizare a instrumentelor noi

- Instrumentul nou trebuie scos din pungă de polietilenă pentru a evita condensul și trebuie depozitat curat, uscat (umiditate atmosferică maximă de 75% RH) și aerisit într-un recipient la temperatura camerei până la prima pregătire.
- Pensele de aplicare a clemelor sunt livrate nesterile. Instrumentele trebuie curățate temeinic și sterilizate înainte de prima utilizare și înainte de fiecare reutilizare.
- Pensele de aplicare a clemelor au fost dezvoltate pentru sterilizarea în autoclavă, acest tip de sterilizare având o istorie dovedită. Puteți utiliza și proceduri la temperatură scăzută, de exemplu STERRAD.

Sfaturi de siguranță privind întreținerea

- Toate instrumentele chirurgicale trebuie manipulate cu cea mai mare grijă în timpul transportului, curățării, îngrijirii, sterilizării și depozitării. În special în cazul lamelor și al fălcilor fine, care sunt piese foarte delicate.


Asamblare / Dezasamblare




Detashați mânerul și tija



Deșurubați inserția

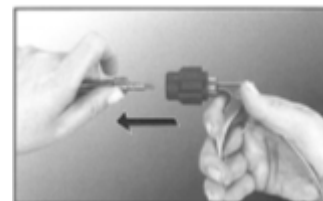


Trageți axul afară din cuplaj

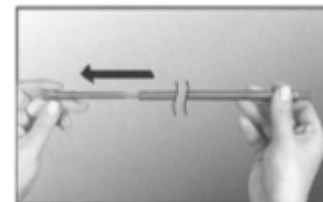


Scoateți inserția din arbore

Vedere detaliată a fălcii

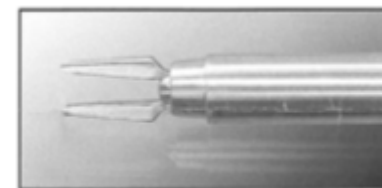

Fălci deschise

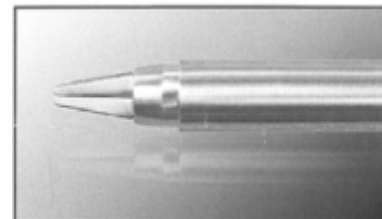

Fălci închise

Pregătire

- Fiecare instrument chirurgical trebuie dezinfectat și curățat cu atenție după fiecare utilizare. Curățați, verificați și testați fiecare instrument cu atenție. Sterilizați toate instrumentele înainte de utilizare. O procedură adecvată de curățare și întreținere va prelungi durata de viață a instrumentelor. Acordați o atenție specială fantelor, dispozitivelor de blocare, închizătorilor, tuburilor și altor părți greu accesibile. Pinceta endoscopică pentru aplicarea clemelor trebuie curățată în stare dezasamblată (vezi Asamblare / Dezasamblare). Pensele pentru aplicarea clemelor pentru chirurgie deschisă trebuie deschise complet (deblocați arcul/deschiderea completă a inelelor).

Atenție

- Nu utilizați detergenți corozivi sau abrazivi (utilizați numai perii moi). Cei mai potriviți sunt detergenții cu pH neutru (7,0).
- Instrumentul este potrivit pentru curățarea cu ultrasunete.
- Clătiți cu apă distilată cu atenție
- Depozitați și sterilizați corespunzător
- După curățare și clătire, instrumentele trebuie uscate cu grijă. Tuburile trebuie suflate.
- Tehnici standard de sterilizare
- Se recomandă sterilizarea instrumentelor în autoclavă.
- Nu sterilizați cu aer cald.
- Cicluri standard de autoclavare:
Sterilizare cu abur la 134 °C/243 °F timp de 15 minute.
Puteți utiliza și alte durate și temperaturi, dar trebuie să le validați mai întâi. (Notă: producătorul autoclavului dvs. trebuie să confirme temperaturile și duratele de sterilizare.) Temperaturile din autoclav nu trebuie să depășească 137 °C/280 °F.

Notă:	- Vă rugăm să respectați instrucțiunile noastre de pregătire nr. 462 pentru instrumentele endoscopice reutilizabile (rezistente la temperaturi ridicate). În cazul în care nu le aveți, vă rugăm să le solicitați.
---------------------	---

Pensă de aplicare a clemelor 10 mm

Accesorii și piese de schimb

LP371-200	Ethic. Ligaturclip pentru pensă de aplicare a clemelor, oțel inoxidabil; cod de culoare: albastru; dimensiune clemă: mică; ambalaj: magazie de 36 cu 6 cleme.
LP371-201	Ethic. Ligaturclip pentru pensă de aplicare a clemelor, oțel inoxidabil; cod de culoare: alb; dimensiune clemă: medie; ambalaj: casetă de 36 cu 6 cleme
LP371-202	Ethic. Ligaturclip pentru pensă de aplicare a clemelor din oțel inoxidabil; cod: verde; dimensiunea clemei: medie-mare; ambalaj: cutie de 18 cu 6 cleme
LP371-203	Ethic. Ligaturclip pentru pensă de aplicare a clemelor din oțel inoxidabil; cod culoare: galben; dimensiune clemă: mare; ambalaj: cutie de 18 bucăți cu 6 cleme.
LP371-210	Ethic. Ligaturclip pentru pensă de aplicare a clemelor din titan; cod de culoare: albastru; dimensiune clemă: mică; ambalaj: cutie de 36 cu 6 cleme
LP371-211	Ethic. Ligaturclip pentru pensă de aplicare a clemelor din titan; cod de culoare: albastru; dimensiunea clemei: mică; ambalaj: cutie de 15 bucăți cu 20 de cleme
LP371-212	Ethic. Ligaturclip pentru aplicarea clemelor. Pincetă din titan; cod de culoare: alb; dimensiunea clemei: medie; ambalaj: 36 de cartușe cu câte 6 cleme
LP371-213	Ethic. Ligaturclip pentru aplicarea cleștelor de titan; cod culoare: alb; dimensiune clemă: medie; ambalaj: 15 casete cu 20 de cleme
LP371-214	Ethic. Ligaturclip pentru aplicarea cleștelor de titan; cod culoare: verde; dimensiune clemă: mediu-mare; ambalaj: 18 casete cu 6 cleme

LP371-215	Ethic. Ligaturclip pentru pensă de aplicare a clemelor din titan; cod de culoare: galben; dimensiune clemă: mare; ambalaj: cutie de 18 bucăți. Cu 6 cleme
-----------	---

Reparații

- Chiar și atunci când sunt utilizate conform destinației, instrumentele chirurgicale sunt supuse unei uzuri mai mult sau mai puțin severe, în funcție de intensitatea utilizării. Această uzură nu poate fi evitată din motive tehnice.
- Vă rugăm să nu efectuați reparații pe cont propriu. Întreținerea și reparațiile pot fi efectuate numai de noi – producătorul – sau de alte persoane autorizate de noi.
- Instrumentele chirurgicale care trebuie trimise înapoi pentru reparații trebuie curățate, dezinfectate și sterilizate.

Simboluri și explicații

	Respectați instrucțiunile de utilizare
REF	Număr de comandă
	Nesteril
	Producător
	Nerespectarea avertismentelor și a precauțiilor poate duce la deces sau la vătămări grave
LOT	Număr de lot
	Marcaj CE, numărul organismului notificat