

Pinceta za pritrditev sponk 10 mm



Številke artiklov

LP371-001	LP371-002	LP371-003
LP371-004	LP371-005	LP371-010
LP371-020	LP371-030	LP371-040
LP371-050	LP371-100	LP371-101
RU 0365-00/08	RU 0365-00/10	RU 0365-00/12
RU 0365-00/19	RU 0365-00/20	RU 0365-00/21
RU 0365-00/22	RU 0365-00/23	RU 0365-00/24
RU 0365-00/25	RU 0365-00/26	RU 0365-00/27
RU 0365-00/41	RU 0365-00/42	RU 0365-00/43
RU 0365-00/44	RU 0365-00/45	RU 0365-00/46
RU 0365-00/47	RU 0365-00/80	RU 0365-00/81

Namen uporabe

- Odločitev o primernosti tega medicinskega izdelka je v rokah uporabnika. Ne prevzemamo odgovornosti za posledice nepravilne uporabe in priprave.

Preizkus delovanja

- Po dobavi in pred vsako uporabo je treba nove instrumente temeljito pregledati in preizkusiti njihovo delovanje. Če instrumenti kažejo kakršne koli zunanje napake (praskе, zlomi, razpoke, zareze, poškodovana izolacija, upognjeni deli ali togost) ali če ne delujejo na opisani način, o tem nemudoma obvestite nas kot proizvajalca ali naše prodajne partnerje.

Opozorila in varnostni ukrepi

- Ne uporabljajte poškodovanih instrumentov.
- Prosimo, da te informacije pazljivo in v celoti preberete. Nepravilna uporaba in nepravilno vzdrževanje ter nepravilno ravnanje lahko povzročijo predčasno obrabo kirurških instrumentov. Osebe, ki uporabljajo ta instrument, morajo imeti znanje o uporabi in ravnanju s kirurškimi instrumenti, dodatki in pripadajočimi napravami.

Prva uporaba novih instrumentov

- Povsem nov instrument je treba vzeti iz polietilenske vrečke, da se prepreči kondenzacija, in ga je treba do prve priprave hraniti čistega, suhega (maks. relativna vlažnost zraka 75 %) in prezračenega v zaščitnem zaboju pri sobni temperaturi.
- Pinceta za nameščanje sponk se dobavlja nesterilna. Instrumente je treba pred prvo uporabo in pred vsako ponovno uporabo temeljito očistiti in sterilizirati.
- Klešče za nameščanje sponk so bile razvite za sterilizacijo v avtoklavu, ta vrsta sterilizacije pa ima dokazano zgodovino. Uporabite lahko tudi postopke z nizko temperaturo, npr. STERRAD.

Varnostna navodila za vzdrževanje

- Z vsemi kirurškimi instrumenti je treba ravnati z največjo previdnostjo med prevozom, čiščenjem, vzdrževanjem, sterilizacijo in shranjevanjem. To velja zlasti za rezila in tanke čeljusti, ki so zelo občutljivi deli.


Sestavljanje / razstavljanje




Odklopite ročaj in držalo



Odvijte vložek

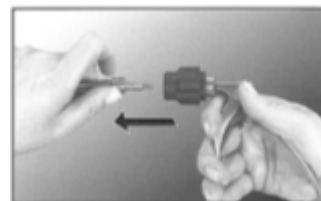


Izvlomite gred iz spojke

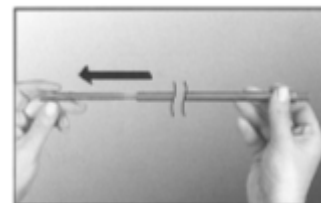


Izvlomite vložek iz gredi

Podrobni pogled na čeljust

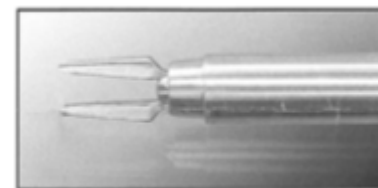

Odpri čeljusti

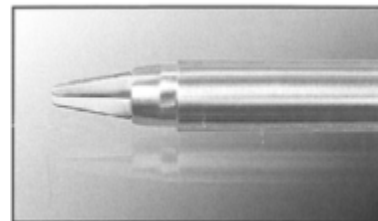

Zaprte čeljusti

Pinceta za pritrditev sponk 10 mm

Priprava

- Vsak kirurški instrument je treba po vsaki uporabi razkužiti in temeljito očistiti. Vsak instrument skrbno očistite, pregledajte in preizkusite. Vse instrumente pred uporabo sterilizirajte. Primeren postopek čiščenja in vzdrževanja bo podaljšal življenjsko dobo instrumentov. Posebno pozornost posvetite režam, zapahom, zapiralkam, cevkam in drugim delom, ki so težko dostopni. Pincete za nameščanje endoskopskih sponk je treba očistiti v razstavljenem stanju (glej Sestavljanje/razstavljanje).
- Klešče za nameščanje sponk za odprto kirurgijo je treba popolnoma odpreti (odklenejte vzmet/popolnoma odprite obroče).

Pozor

- Ne uporabljajte jedkih ali abrazivnih čistil (uporabljajte le mehke krtače). Najbolj primerna so čistila z nevtralnim pH (7,0).
- Instrument je primeren za ultrazvočno čiščenje.
- Pazljivo sperite z destilirano vodo
- ustrezno shranite in sterilizirajte
- Po čiščenju in izpiranju je treba instrumente skrbno posušiti. Cevke je treba izpihati.
- Standardne tehnike sterilizacije
- Priporočljivo je, da instrumente sterilizirate v avtoklavu.
- Ne sterilizirajte v vročem zraku.
- Standardni cikli avtoklava:
Sterilizacija s paro 134 °C/243 °F za 15 min. Lahko uporabite tudi druge čase in temperature, vendar jih morate najprej preveriti. (Opomba: proizvajalec vašega avtoklava mora potrditi temperature in čase sterilizacije.) Temperature v avtoklavu ne smejo presegati 137 °C/280 °F.



Opomba:

- Upoštevajte naša navodila za pripravo št. 462 za ponovno uporabne endoskopske instrumente (toplotno odporne). Če jih nimate, jih prosimo zahtevajte.

Dodatki in nadomestni deli

LP371-200	Ethic. Ligaturclip za klešče za nameščanje sponk, iz nerjavečega jekla; barvna oznaka: modra; velikost sponke: majhna; pakiranje: 36-delni vložek s 6 sponkami.
LP371-201	Ethic. Ligaturclip za klešče za nameščanje sponk iz nerjavečega jekla; barvna oznaka: bela; velikost sponke: srednja; pakiranje: 36-delni vložek s 6 sponkami
LP371-202	Ethic. Ligaturclip za klešče za nameščanje sponk iz nerjavečega jekla; barvna koda: zelena; velikost sponke: srednje velika; pakiranje: 18-delni vložek s 6 sponkami
LP371-203	Ethic. Ligaturclip za klešče za nameščanje sponk iz nerjavečega jekla; barvna koda: rumena; velikost sponke: velika; pakiranje: 18 kaset s po 6 sponkami.
LP371-210	Ethic. Ligaturclip za klešče za nameščanje sponk iz titana; barvna koda: modra; velikost sponke: majhna; pakiranje: 36-kosni vložek s 6 sponkami
LP371-211	Ethic. Ligaturclip za klešče za nameščanje sponk iz titana; barvna oznaka: modra; velikost sponke: majhna; pakiranje: 15 kaset s 20 sponkami
LP371-212	Ethic. Ligaturclip za nameščanje sponk. Pinceta iz titana; barvna oznaka: bela; velikost sponke: srednja; pakiranje: 100 kosov V kompletu s 6 sponkami
LP371-213	Ethic. Ligaturclip za namestitve sponk titanove klešče; barvna oznaka: bela; velikost sponke: srednja; pakiranje: 15 vstavkov Z 20 sponkami
LP371-214	Ethic. Ligaturclip za klešče za nameščanje sponk ti; barvna oznaka: zelena; velikost sponke: srednje velika; pakiranje: 18 v reviji S 6 sponkami

LP371-215	Ethic. Ligaturclip za klešče za nameščanje sponk iz titana; barvna oznaka: rumena; velikost sponke: velika; pakiranje: 18-delni vložek. Vsebuje 6 sponk
-----------	---

Popravila

- Tudi pri predvideni uporabi so kirurški instrumenti izpostavljeni večji ali manjši obrabi, odvisno od intenzivnosti uporabe. Te obrabe ni mogoče preprečiti zaradi tehničnih razlogov.
- Prosimo, da popravil ne izvajate sami. Servisiranje in popravila lahko izvajamo le mi – proizvajalec – ali druge osebe, ki smo jih pooblastili.
- Kirurški instrumenti, ki jih je treba poslati v popravilo, morajo biti očiščeni, razkuženi in sterilizirani.

Simboli in pojasnila

	Upoštevajte navodila za uporabo
REF	Številka naročila
	Nesterilno
	Proizvajalec
	Neupoštevanje opozoril in varnostnih ukrepov lahko povzroči smrt ali hude poškodbe
LOT	Številka serije
CE	Številka priglasenega organa za oznako CE



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Nemčija
Tel. +49 7463 9956-0
Faks +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com