


**HÄMORRHOIDAL LIGATOR**

**HÄMORRHOIDAL LIGATOR**

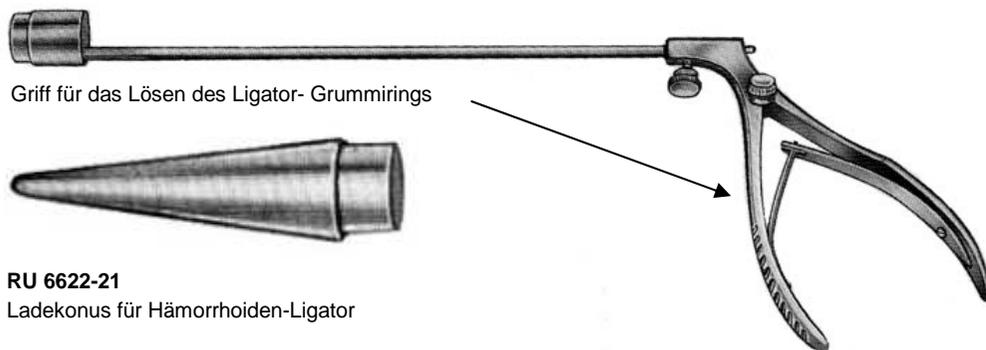

**RU 6622-21**  
Ladekonus für Hämorrhoiden-Ligator

**ARTIKEL NUMMERN**

- RU 6622-00
- RU 6622-05
- RU 6621-00
- RU 6621-01

**VERWENDUNGSZWECK**

- Der wiederverwendbare Hämorrhoidal Ligator wird benutzt um Hämorrhoidalknötchen abzubinden. Somit wird der Blutfluss getrennt und die Hämorrhoiden können nicht mehr mit Nährstoffe versorgt werden. Das Gewebe stirbt ab und die Hämorrhoiden fallen nach zwei bis fünf Tagen ab.

**KONTRAINDIKATIONEN**

Der Hämorrhoidal Ligator darf bei folgenden Indikationen NICHT angewendet werden:

- Große Hämorrhoiden Grad IV
- Antikoagulierte Patienten
- Septische Infektionen im anorektalen Bereich
- Hypertrophe Analpapille
- Chronische Analfissur

**FUNKTIONSTEST**

- Jedes neue Instrument muss vor der Auslieferung und dem ersten Gebrauch bzw. Einsatz, eine visuelle und funktionale Inspektion durchlaufen haben.
- Sollte das Instrument visuell erkennbare Defekte (Kratzer, Brüche, Risse, Einkerbungen, Verbiegungen und Undichtigkeit ) aufweisen, sowie Beeinträchtigungen in der Funktion, die nicht dieser Anweisung entsprechen, benachrichtigen Sie uns als Hersteller oder ihren Händler unverzüglich.

	Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Instrument. Bei Beschädigungen nach der Sterilisation des Instruments muss das Instrument nach den Krankenhausrichtlinien dementsprechend repariert und entsorgt werden..
--	--

**ERSTANWENDUNG EINES NEUEN INSTRUMENTS**

- Der Hämorrhoidal-Ligator wird unsteril ausgeliefert. Das Instrument muss vor dem ersten Gebrauch gereinigt und sterilisiert werden.

**OPERATIONSVERFAHREN**

Das Verfahren der Ligation ist einfach und effektiv und erfordert keine Anästhesie. Der Konus erleichtert das Beladen des Ligators mit dem Gummiring.

1. Rollen sie den Gummiring über den Ladekonus bis zum maximalausgedehnten Durchmesser und Ende des Ladekonus. Entfernen Sie den Ladekonus.
2. Fassen die Hämorroide mit einer Pinzette und ziehen Sie die Hämorroide durch die Perforation des Ligatorzylinders. Für eine schmerzfreie Behandlung des Patienten, sollten sie eine proximale Position des Gummiring wählen
3. Drücken Sie den Griff am Ligator, dadurch schiebt sich der Ligatorzylinder nach vorne und der Ligatur-Gummiring wird losgelöst. Vergewissern Sie sich, dass der Gummiring ordnungsgemäß um die Hämorroide platziert wurde, so dass eine Trennung der Blutzufuhr des hämorrhoidalen Gewebes gewährleistet ist.

**ANWEISUNG ZUR AUFBEREITUNG**

	Bitte beachten Sie unsere Aufbereitungsanweisung A0462 für wiederverwendbare, chirurgische Instrumente (thermostabil). Falls Sie diese noch nicht haben, dann fragen Sie bitte nach unserer Aufbereitungsanweisung.
--	---

**BEDINGUNGEN FÜR DIE AUFBEREITUNGEN**

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir maximal 1000 Aufbereitungszyklen.

**REPARATUREN**

- Auch wenn das Instrument immer ordnungsgemäß für den vorhergesehenen Zweck verwendet wurde, kann es nach geraumer Zeit und intensiver Beanspruchung zu Verschleißerscheinungen kommen. Der Verschleiß kann aus technischen Gründen nicht vermieden werden.

- Bitte nehmen Sie keine Wartungs- und oder Reparaturarbeiten am Instrument vor. Wartungs- und oder Reparaturarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder von Personen, die von uns autorisiert wurden, durchgeführt werden.
- Chirurgische Instrumente, die zur Reparatur an uns zurück geschickt werden, müssen davor gereinigt, desinfiziert und sterilisiert sein.

**SICHERHEITSINFORMATION UND ERKLÄRUNG DER SYMBOLE**

	Gebrauchsanweisung beachten
	Katalognummer
	Unsteril
	Hersteller
	Achtung! Benutzer muss die Gebrauchsanweisung einhalten.
	Chargenbezeichnung
	Europäischen Konformitätszeichen

RUDOLF Medical GmbH + Co. KG  
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany  
Tel. +49 7463 9956-0  
Fax +49 7463 9956-56  
[mail@rudolf-med.com](mailto:mail@rudolf-med.com)  
[www.rudolf-med.com](http://www.rudolf-med.com)