

## INSTRUCCIONES DE USO (ES) PINZAS DE BIOPSIA, PINZAS PARA CUERPOS EXTRAÑOS, PINZAS DE AGARRE Y TIJERAS PARA HISTEROSCOPIA



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG  
Zollerstrasse 1, 78567 Fridingen an der Donau,  
Alemania  
Tel. +49 7463 9956-0  
Fax +49 7463 9956-56  
[sales@RUDOLF-med.com](mailto:sales@RUDOLF-med.com)  
[www.RUDOLF-med.com](http://www.RUDOLF-med.com)



D0819 / Rev C / ACR00413 / 09-05-2023

**LEA, POR FAVOR, EL DOCUMENTO ANTES DE REPROCESAR Y GUÁRDELO EN UN LUGAR SEGURO**

### PRODUCTO

Estas instrucciones de uso se refieren al montaje y desmontaje de las pinzas de biopsia, pinzas para cuerpos extraños y de agarre RUDOLF Medical y de las tijeras para histeroscopia, destinadas a la extracción de tejido de muestra durante la histeroscopia.

Está recibiendo un producto de alta calidad, cuyo manejo y uso adecuados se describen a continuación.



Las siguientes instrucciones se refieren al desmontaje del instrumento tras la intervención quirúrgica y al montaje tras el proceso de limpieza y desinfección.

Encontrará instrucciones detalladas para el reprocesamiento en la IFU D0462:




Los instrumentos médicos RUDOLF se suministran no estériles y deben limpiarse, desinfectarse y esterilizarse antes del primer uso e inmediatamente después de cada uso. Los tapones protectores y los embalajes de transporte deben retirarse previamente. Recomendamos tratar las partes mecánicas del instrumento con un lubricante antes de la esterilización.


Antes de cada uso, debe realizarse una comprobación visual y de funcionamiento exhaustiva.

### DESMONTAJE

1. Afloje el tornillo (1) en sentido antihorario y retírelo (2).
2. Afloje la tuerca moleteada del mango (1) en el sentido contrario a las agujas del reloj y retírela.

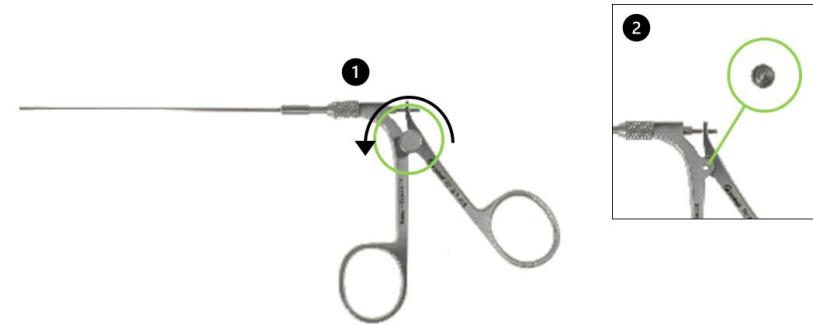


3. Retire la parte del mango que tiene el anillo destinado al dedo pulgar (2) y extraiga el terminal del mango (3).

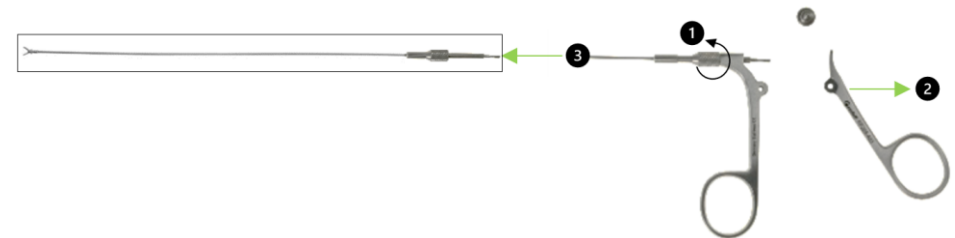

## MONTAJE

1. Introduzca el terminal del instrumento (1) en la abertura delantera del mango y enrosque la tuerca moleteada en el sentido de las agujas del reloj (2).
2. Coloque el extremo de trabajo (3) antes de fijar el tornillo.
3. Introduzca la parte del mango que tiene el anillo destinado al dedo pulgar (4), con el gancho, en la ranura (5) del terminal del instrumento y en el cierre de rosca (6).

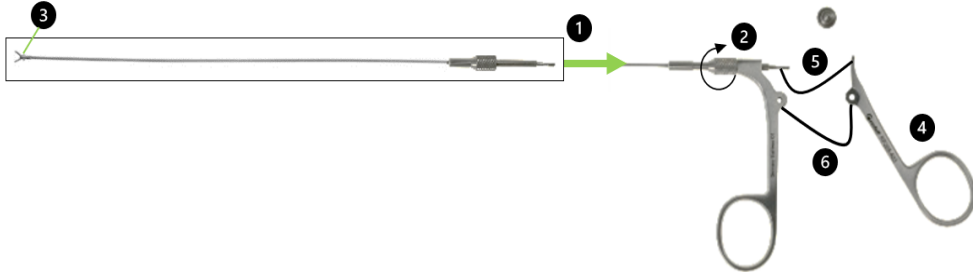

2. Apriete el tornillo del mango en el sentido de las agujas del reloj.



## SÍMBOLOS

	Consulte las instrucciones de uso.
	Código de lote
	Nº de catálogo
	Unidades por paquete
	Sin esterilizar
	Precaución
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Marcado CE conforme a la Directiva 93/42/CEE del Consejo
	Lubricar con aceite médico blanco biocompatible sin silicona, aprobado para la esterilización por vapor.
	Producto sanitario