

MODE D'EMPLOI (FR)

PINCE À BIOPSIE, À CORPS ÉTRANGERS ET À PRÉHENSION ET CISEAUX POUR L'HYSTÉROSCOPIE



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstrasse 1, 78567 Fridingen an der Donau,
Allemagne
Tél. +49 7463 9956-0
Fax +49 7463 9956-56
sales@RUDOLF-med.com
www.RUDOLF-med.com



D0819 / Rev C / ACR00413 / 2023-08-04

À LIRE AVANT LE RETRAITEMENT ET À CONSERVER EN LIEU SÛR

PRODUIT

Ce mode d'emploi concerne le montage et le démontage de la pince à biopsie, à corps étrangers et à préhension RUDOLF Medical et des ciseaux pour l'hystérocopie qui sont destinés au prélèvement d'échantillons de tissus pendant l'hystérocopie.

Vous recevez un produit de haute qualité dont la manipulation et l'utilisation correctes sont décrites ci-dessous.



Les instructions suivantes concernent le démontage de l'instrument après l'intervention chirurgicale et son montage après le processus de nettoyage et de désinfection.

Des instructions détaillées sur le retraitement figurent dans l'IFU D0462 :




Les instruments médicaux RUDOLF sont livrés non stériles et doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés avant la première utilisation et immédiatement après chaque utilisation. Les capuchons de protection et les emballages de transport doivent être retirés au préalable. Nous recommandons de traiter les parties mécaniques de l'instrument avec un lubrifiant avant la stérilisation.


Un contrôle fonctionnel et visuel approfondi doit être effectué avant chaque utilisation.

DÉMONTAGE

1. Desserrez la vis (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez la (2).
2. Desserrez l'écrou moleté de la poignée (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez le.

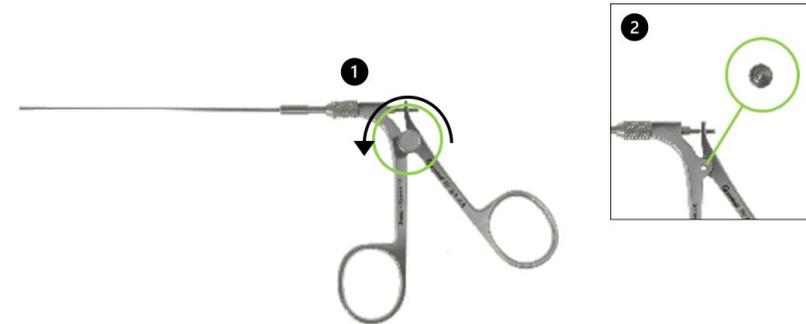


3. Retirez la poignée amovible (2) et tirez l'insert de l'instrument hors de la poignée (3).

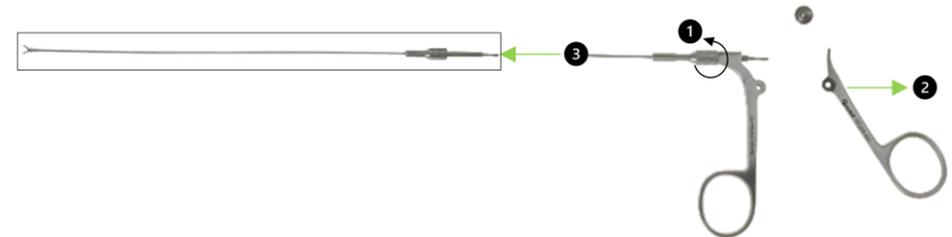

ASSEMBLAGE

1. Insérez l'insert de l'instrument (1) dans l'ouverture avant de la poignée et vissez l'écrou moleté dans le sens des aiguilles d'une montre (2).
2. Positionnez l'extrémité utile (3) avant de fixer la vis.
3. Insérez la poignée amovible par le pouce (4) avec le crochet dans la rainure (5) de l'insert de l'instrument et dans la vis de blocage (6).

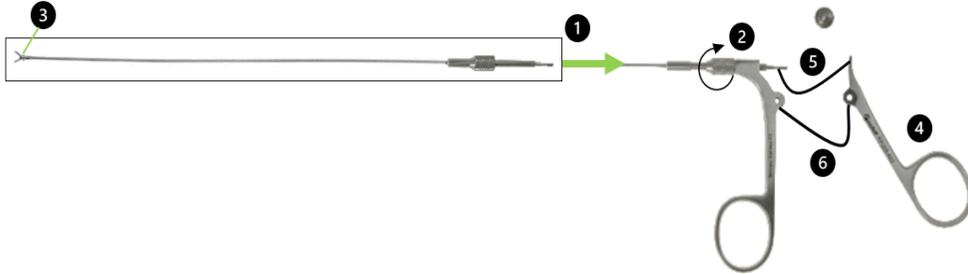

2. Fixez la vis de la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre.



SYMBOLES

	Consulter le mode d'emploi.
	Code du lot
	Numéro d'article
	Nombre par paquet
	Non stérile
	Attention
	Fabricant
	Date de fabrication
	Marquage CE conformément à la directive européenne 93/42/EWG
	Lubrifier avec une huile médicale blanche biocompatible, sans silicone, approuvée pour la stérilisation à la vapeur.
	Dispositif médical