

NAVODILA ZA UPORABO (SL) REZILA IN ROČAJI ZA SKALPEL



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstrasse 1, 78567 Fridingen an der Donau,
Nemčija
Tel. +49 7463 9956-0
Faks +49 7463 9956-56
sales@RUDOLF-med.com
www.RUDOLF-med.com

D0839 / Rev B / ACR00474 / 2026-04-20



PREBERITE PRED PONOVRNO OBDELAVO IN HRANITE NA VARNEM MESTU

IZDELEK

Ta navodila za uporabo se nanašajo na sestavljanje in razstavljanje skalpelnih rezil in ročajev skalpelov RUDOLF Medical.

Prejeli ste visokokakovosten izdelek, katerega pravilno ravnanje in uporabo opisujemo v nadaljevanju.

Samo za profesionalno uporabo: Instrumenti so namenjeni izključno profesionalnim uporabnikom (kirurgom, operacijskim medicinskim sestram, tehnikom za ponovno obdelavo medicinskih pripomočkov).

Skupina pacientov: Ni omejitev glede skupine pacientov. Odločitev, ali koristi prevladajo nad tveganjem pri dani skupini pacientov, je prepuščena presoji in izkušnjam zdravstvenega delavca.



Naslednja navodila se nanašajo na razstavljanje po kirurškem posegu ter na sestavljanje po čiščenju in razkuževanju.

Podrobna navodila za obdelavo najdete v navodilih za uporabo D0462:



Instrumenti RUDOLF Medical se dobavljajo nesterilni in jih je treba pred prvo uporabo ter takoj po vsaki uporabi očistiti, razkužiti in sterilizirati. Pred tem je treba odstraniti zaščitne pokrovčke in transportno embalažo.

Pred sterilizacijo priporočamo, da mehanske dele instrumenta obdelate z oljem za vzdrževanje.

Pred vsako uporabo je treba opraviti celovit vizualni in funkcionalni pregled instrumentov.

NAMEN

Kirurški instrumenti za večkratno uporabo so namenjeni kirurškim posegom in se lahko ponovno uporabijo po ustrezni ponovni obdelavi.

KONTRAINDIKACIJE

Medicinski pripomočki niso namenjeni za uporabo na centralnem živčnem in krvnem sistemu.

OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI

- Pri uporabi in ravnanju s skalpeli bodite previdni; obstaja nevarnost poškodb.
- Pri izbiri rezila in ročaja skalpela se prepričajte, da sta med seboj združljiva glede na povezavo.
- Pri sestavljanju/razstavljanju se izogibajte prekomerni sili ali pritisku na rezilo skalpela, saj se lahko zlomi in povzroči poškodbe.

PREDEN GA UPORABITE: VIZUALNI IN FUNKCIJSKI PREGLED

Preverite:

- Zunanje poškodbe (npr. vdolbine, ostri robovi, razpoke ali ostre robove)
- Pravilno delovanje
- Ostanki čistilnih sredstev ali razkužil

OPIS IZDELKA

⚠ Rezila skalpelov se lahko kombinirajo le z ročaji istega tipa priključka.

Ročaji skalpelov za rezila s kratko dolžino vpetja


Ročaji skalpelov modelov 3, 3L, 3LA, 5, 5A, 7 in 7K imajo priključek za rezila skalpelov s kratko dolžino vpetja.

Ročaji skalpelov za rezila z dolgo dolžino vpetja

Ročaji skalpelov modelov 4, 4L in 4LA imajo priključek za rezila skalpelov z dolgo dolžino vpetja.


Sestava:

1. Rezilo skalpela z očeskom (1) namestite na priključek ročaja skalpela (2).
2. Vstavite skalpelo rezilo v utore priključka ročaja.
3. Rezilo skalpela potisnite do konca v priključek ročaja. Konec rezila se zaskoči na svoje mesto.

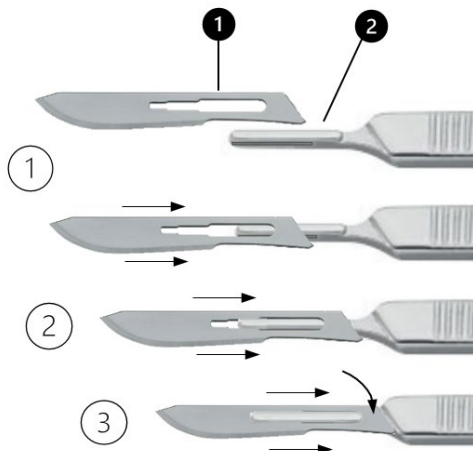

Razstavljanje:

1. Pritisnite vzmetni konec rezila skalpela (1) iz spojke ročaja, dokler ga ni mogoče potisniti nazaj skozi utore spojke (2).
2. Potisnite rezilo skalpela nazaj iz reže ročaja, dokler se ročaj ne sprostí iz očesa.
3. Odstranite rezilo skalpela iz ročaja.

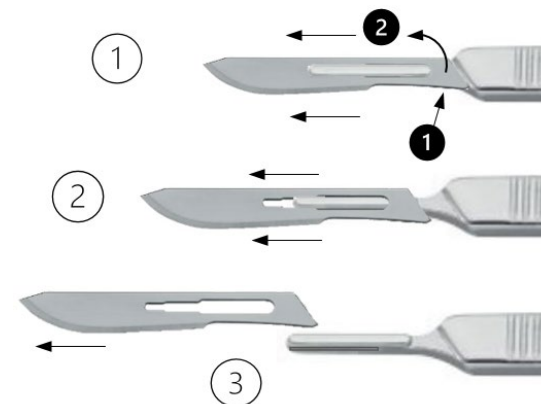

Ročaji skalpelov za sistem mini skalpelov


Ročaji skalpela za mini skalpelska rezila imajo vpenjalno napravo, v katero se lahko vpenje mini skalpelsko rezilo.

Ti ročaji so sestavljeni iz treh delov in jih je mogoče razstaviti. Sestavljeni so iz vpenjalne glave (1), narebrenega matica (2) in ročaja (3).




Sestavljanje:

1. Namestite narebričeno matico (2) na ročaj (3).
2. Vstavite vpenjalno pušo (1) skozi nazobčano matico v ročaj in jo privijte v smeri urinega kazalca skupaj z ročajem.
3. Konec skalpelnega rezila vstavite do konca v vpenjalno pušo. Primite narebričeno matico in skalpelo rezilo pritrdite z ročajem.

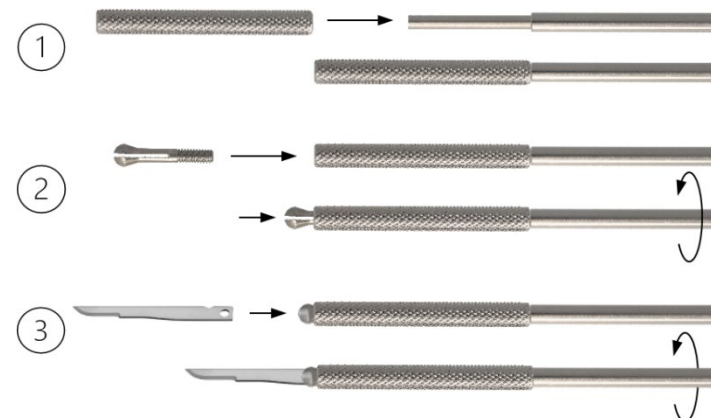





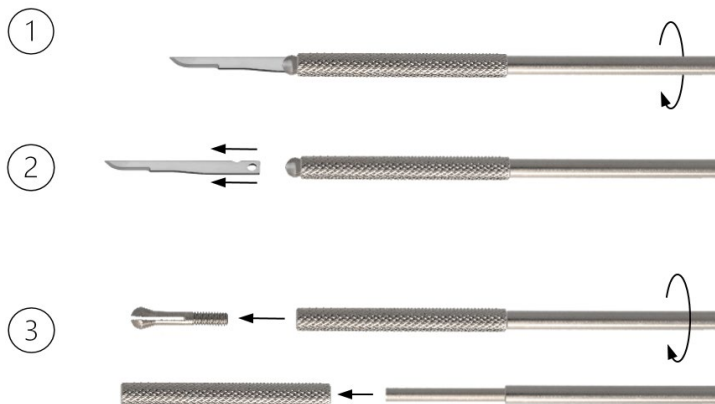





Razstavljanje:

1. Sprostite vpenjalno obroček (1) tako, da ročaj (3) zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, medtem ko trdno držite narebričeno matico (2).
2. Odstranite rezilo skalpela.
3. Sedaj razstavite ročaj za ponovno obdelavo. Sprostite vpenjalno glavo (1) iz ročaja tako, da ročaj zavrtite še naprej v nasprotni smeri urinega kazalca. Nato odstranite narebričeno matico z ročaja.



SIMBOLI

	Glejte navodila
	Šifra serije
	Številka izdelka
	Število v paketu
	Nesterilno
	Previdnost
	Proizvajalec
	Datum izdelave
 0297	Oznaka CE v skladu z Uredbo (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih z identifikacijsko številko priglašene organa
	Zdravstvena pripomočka