

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO (PT) LÂMINAS DE BISTURI E CABEÇAS DE BISTURI



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG  
Zollerstrasse 1, 78567 Fridingen an der Donau,  
Alemanha  
Tel. +49 7463 9956-0  
[sales@RUDOLF-med.com](mailto:sales@RUDOLF-med.com)  
[www.RUDOLF-med.com](http://www.RUDOLF-med.com)

D0839 / Rev C / ACR01447 / 2026-06-01



### LEIA ANTES DE PROCESSAR NOVAMENTE E GUARDE EM LOCAL SEGURO

#### PRODUTO

Estas instruções de utilização referem-se à montagem e desmontagem das lâminas e cabos de bisturi da RUDOLF Medical.

Está a receber um produto de alta qualidade, cujo manuseamento e utilização adequados são descritos abaixo.

**Apenas para uso profissional:** Os instrumentos destinam-se a ser utilizados apenas por utilizadores profissionais (cirurgiões, enfermeiros de bloco operatório, técnicos de reprocessamento de dispositivos médicos).

**População de doentes:** Não existem restrições relativas à população de doentes. A decisão de se os benefícios superam os riscos numa determinada população pode ser deixada ao critério e experiência do profissional de saúde.



As instruções seguintes referem-se à desmontagem após o procedimento cirúrgico e à montagem após a limpeza e desinfeção.

Instruções detalhadas para o reprocessamento podem ser encontradas no IFU D1494:



Os instrumentos RUDOLF Medical são fornecidos não esterilizados e devem ser limpos, desinfectados e esterilizados antes da primeira utilização e imediatamente após cada utilização. As tampas de protecção e a embalagem de transporte devem ser removidas previamente.

Antes da esterilização, recomendamos tratar as partes mecânicas do instrumento com um óleo de manutenção.

Deve ser realizada uma inspeção visual e funcional abrangente dos instrumentos antes de cada utilização.

#### FINALIDADE PREVISTA

Os bisturis e as facas destinam-se a realizar incisões na pele e cortes nos tecidos.

#### CONTRA-INDICAÇÃO

Os dispositivos médicos não se destinam a ser utilizados no sistema nervoso central e no sistema circulatório.

#### AVISOS E PRECAUÇÕES

- Tenha cuidado ao utilizar e manusear bisturis; existe risco de lesão.
- Ao seleccionar uma lâmina e um cabo de bisturi, certifique-se de que são compatíveis entre si em termos de encaixe.
- Ao montar/desmontar, evite aplicar força ou pressão excessiva na lâmina do bisturi, pois esta pode partir-se e causar ferimentos.

#### ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO: INSPEÇÃO VISUAL E FUNCIONAL

Verifique se há:

- Danos externos (por exemplo, amolgadelas, rebarbas, fissuras ou arestas afiadas)
- Correto funcionamento
- Resíduos de produtos de limpeza ou desinfetantes

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

⚠ As lâminas de bisturi só podem ser combinadas com cabos do mesmo tipo de encaixe.

### **Cabo de bisturi para lâminas com comprimento de fixação curto**


Os cabos de bisturi dos modelos 3, 3L, 3LA, 5, 5A, 7 e 7K possuem uma conexão para lâminas de bisturi com comprimento de fixação curto.

### **Cabos de bisturi para lâminas com comprimento de fixação longo**

Os cabos de bisturi dos modelos 4, 4L e 4LA possuem uma conexão para lâminas de bisturi com comprimento de fixação longo.


#### **Montagem:**

1. Coloque a lâmina de bisturi com o orifício (1) na conexão do cabo do bisturi (2).
2. Insira a lâmina de bisturi nas ranhuras da conexão do cabo.
3. Empurre a lâmina do bisturi completamente para dentro da conexão do cabo. A extremidade da lâmina encaixa no lugar.

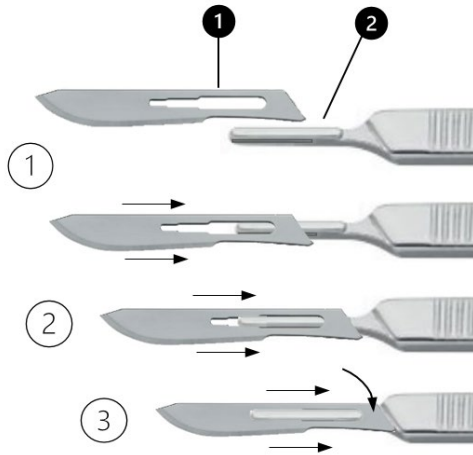

#### **Desmontagem:**

1. Pressione a extremidade elástica da lâmina do bisturi (1) para fora do conector do cabo até que possa ser empurrada de volta através das ranhuras do conector (2).
2. Deslize a lâmina do bisturi para fora da ranhura do cabo até que o cabo seja libertado do seu orifício.
3. Retire a lâmina do bisturi do cabo.

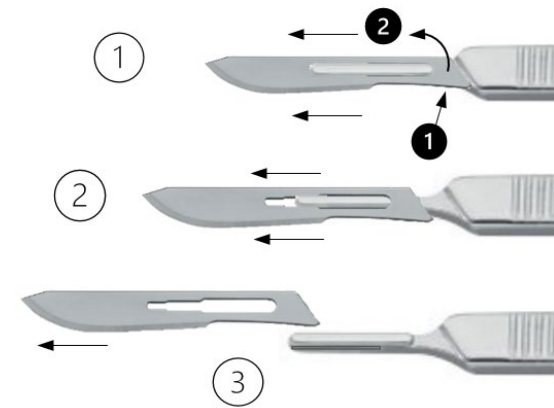

### **Cabos de bisturi para o sistema de mini-bisturi**


Os cabos de bisturi para lâminas de mini bisturi possuem um dispositivo de fixação no qual uma lâmina de mini bisturi pode ser fixada.

Estes cabos são compostos por três partes e podem ser desmontados. São constituídos por uma pinça (1), uma porca serrilhada (2) e um cabo (3).




#### **Montagem:**

1. Coloque a porca serrilhada (2) no cabo (3).
2. Insira a pinça (1) através da porca serrilhada no cabo e aperte-a no sentido horário com o cabo.
3. Insira a extremidade da lâmina de bisturi completamente na pinça. Segure a porca serrilhada e aperte a lâmina de bisturi com o cabo.

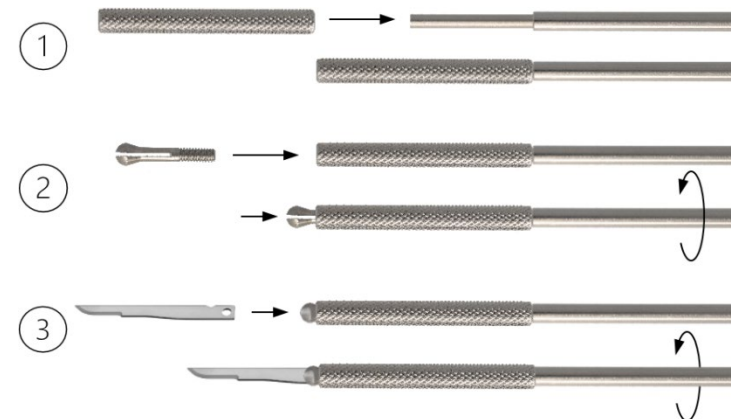

### **Desmontagem:**

1. Solte a pinça (1) rodando a pega (3) no sentido anti-horário enquanto segura firmemente a porca serrilhada (2).
2. Retire a lâmina do bisturi.
3. Desmonte agora a pega para reprocessamento. Solte a pinça (1) da pega, rodando a pega ainda mais no sentido anti-horário. Em seguida, retire a porca serrilhada da pega.

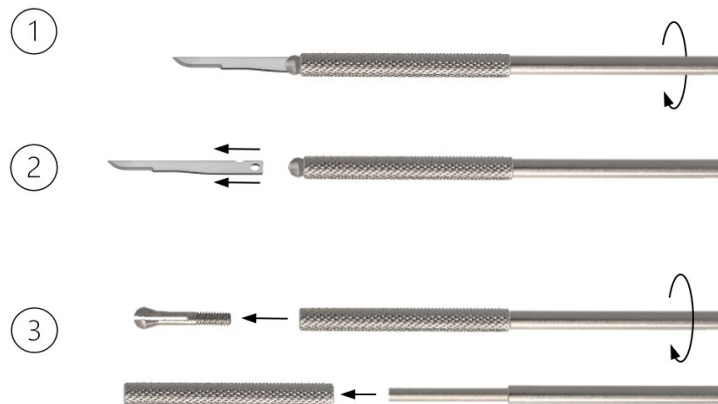

### **SÍMBOLOS**

	Consulte as instruções
	Código do lote
	N.º do artigo
	N.º por embalagem
	Não esterilizado
	Precaução
	Fabricante
	Data de fabrico
	Marcação CE de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745 relativo aos dispositivos médicos, com número de identificação do organismo notificado
	Dispositivo médico